


ELEVADOR DE WC REGULABLE EN ALTURA E INCLINACIÓN

Ref. AD510

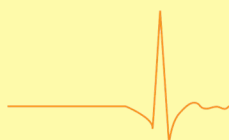

- Este es el elevador más versátil y seguro del mercado.
- Para adaptarlo apropiadamente a cada usuario se puede ajustar a 3 diferentes alturas (5, 10 y 15 cm) y además se puede regular en inclinación. Todo ello sin herramientas y en pocos minutos.
- Proporciona la máxima seguridad ya que va montado directamente (sin necesidad de herramientas) en los orificios que tienen las tazas del inodoro.
- Diseño ergonómico y funcional sin rincones que retengan la suciedad y fabricado sólo con materiales inoxidables y de la mejor calidad: aluminio y polipropileno (PP).
- Disponible sin reposabrazos y con reposabrazos abatibles para aquellos casos en que sea necesario un apoyo adicional



ELEVADOR DE WC REGULABLE EN ALTURA E INCLINACIÓN

Escoger el asiento adecuado



En la mayoría de casos, las caderas y las rodillas deberían estar a la misma altura. Un asiento demasiado bajo puede estar desaconsejado (postoperados de cadera) y resultar incómodo para levantarse.

Carga máxima 135 Kgs



1. Mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Esta es la altura de asiento recomendada.
2. Mida la altura de su asiento actual y réstela de la primera medida.
3. La diferencia entre las dos medidas es la altura del asiento elevador requerida. Adquiera el elevador con la medida más próxima. Las disponibles en el mercado con 5, 10 y 15 cm

Modelo	Descripción	Altura regulable	Ancho total sin reposabrazos	Ancho total con reposabrazos	Ancho entre reposabrazos	Fondo total	Ancho orificio	Fondo orificio
AD510	Con reposabrazos	5—10—15cm	37 cm	61 cm	51 cm	49 cm	23 cm	28 cm

HELIANTHUS MEDICAL, S.L


C/ TELECOMUNICACIONES 25—P. I. URTINSA II

28923 ALCORCÓN (MADRID)

TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM

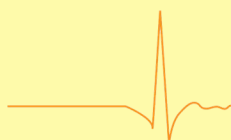

Helianthus Medical

