

Renol

Seguridad y comodidad del paciente

RENOL es una empresa especializada en productos para el posicionamiento y la fijación de pacientes. Con 40 años de experiencia, RENOL ofrece una gama completa de productos profesionales, duraderos, suaves y competitivos que cumplen perfectamente con las necesidades de seguridad y comodidad diarias de los pacientes de todas las edades. El objetivo principal es garantizar la seguridad del paciente y la serenidad del personal sanitario.



Enfoque innovador

Renol

Evaluación de riesgos

Proponemos un enfoque innovador y "progresivo" para garantizar la seguridad del paciente. Basándonos en una evaluación objetiva por parte del personal sanitario de los riesgos de caídas y lesiones graves, ofrecemos soluciones a medida para proteger al paciente.

Soluciones alternativas

Hemos desarrollado productos de posicionamiento ergonómicos y multifuncionales, con énfasis en la seguridad y el confort del paciente.

Cuestionamiento sobre productos de inmovilización

Un compromiso con la reconsideración sistemática de la necesidad de productos de inmovilización fuertes, promoviendo un enfoque centrado en el paciente.

Ética y dignidad del paciente


Nuestra empresa enfatiza el respeto por la ética y la dignidad del paciente, buscando soluciones alternativas para la seguridad del paciente.



Surtido de productos

Hemos desarrollado un amplio surtido de productos de posicionamiento y fijación para estabilizar y asegurar al paciente en su silla o cama y evitar accidentes. Los productos incluyen cojines, diferentes dispositivos de protección y correas y cinturones adecuados para una posición cómoda y óptima.

Nuestro surtido completo de fijación permite asegurar al paciente en la silla, la cama y la camilla.

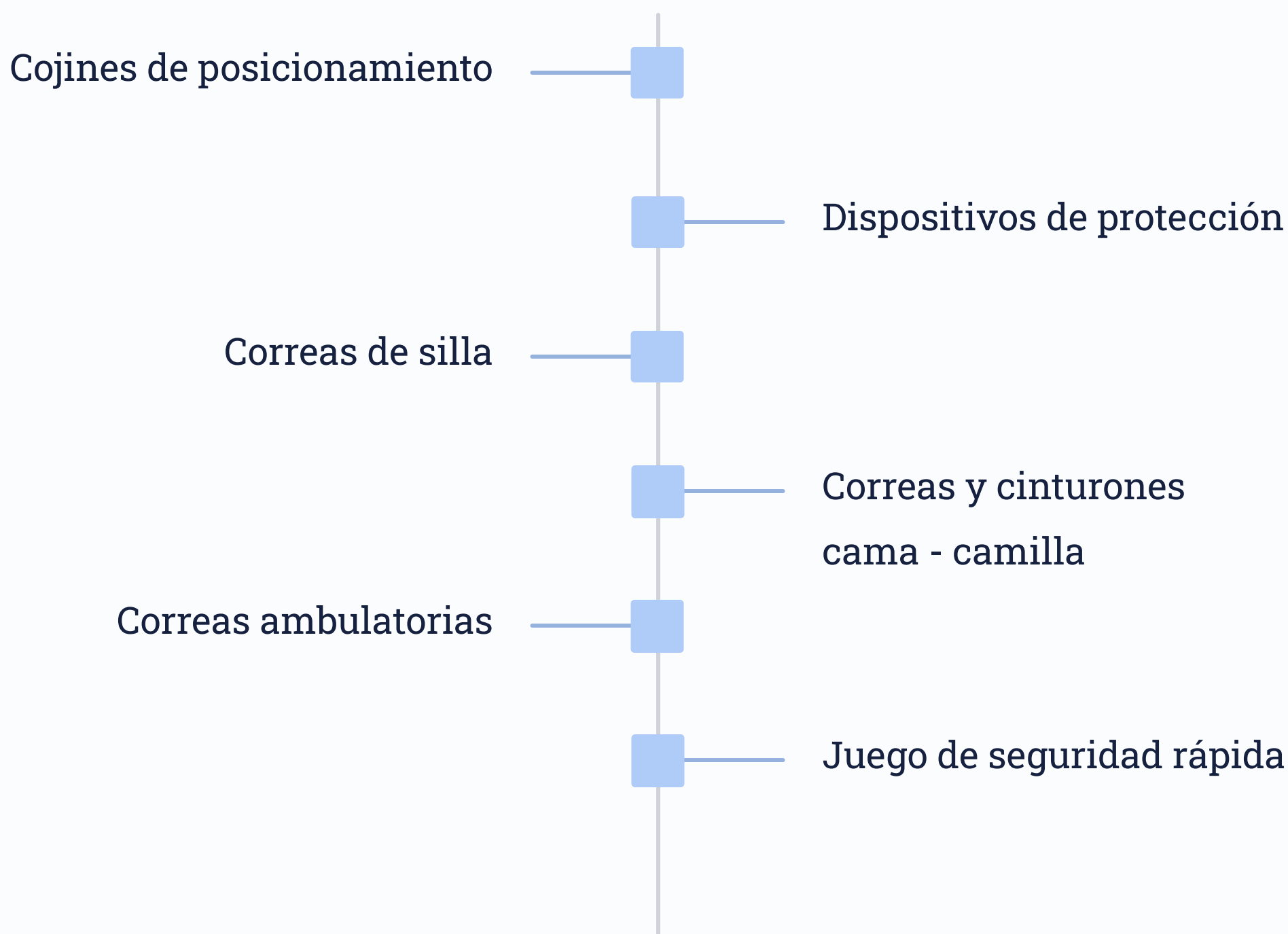

Posicionamiento en la silla



Cojín inclinado con abducción

El cojín inclinado con abducción limita el deslizamiento hacia adelante y alivia los puntos de presión.

- Ref: RCV07300

-Tamaño: 6Ax42Lx42a cm

- Ref: RCV07400

-Tamaño: 10Ax42Lx42a cm



Cojín premium

Combinación de tres cojines (se venden por separado). Nuestra fórmula combinada ofrece una comodidad máximamente adaptable para cualquier silla o silla de ruedas.

- Ref: RFC56000



Cojín lunar

El cojín lunar ofrece un apoyo óptimo para los brazos y proporciona una posición estable gracias a la correa.

Combine el cojín lunar con el cojín inclinado con abducción para un apoyo suave.

- Ref: RCM35209



Zapatos de freno

Las zapatillas de freno evitan el deslizamiento y mantienen los pies en los reposapiés.

- Ref: RCS10045

Posicionamiento en la cama



Cojín de posicionamiento

El cojín de posicionamiento se adapta perfectamente a los contornos del cuerpo y ofrece diferentes posibles aplicaciones.

- Ref: RCM11100

-Tamaño: 180L cm

Funda de algodón con cremallera disponible.

- Ref: RCM11188



Cojín de posicionamiento largo

El cojín de posicionamiento largo se adapta perfectamente a los contornos del cuerpo y ofrece diferentes posibles aplicaciones.

- Ref: RCM12200

-Tamaño: 280L cm

Funda de algodón con cremallera disponible.

- Ref: RCM12288



Cojín de confort

El cojín de confort, colocado debajo de los muslos, proporciona una buena posición y ofrece diferentes posibles aplicaciones.

- Ref: RCM14000

-Tamaño: 38x50 cm

Funda de algodón con cremallera disponible.

- Ref: RCM14088



Barrera de protección

Las barreras de protección se fijan a los cabeceros de la cama para proteger contra los golpes.

- Ref: RCP10153

-Tamaño: 40Hx153L cm

- Ref: RCP10195

-Tamaño: 40Hx190L cm

Dispositivos de protección

Guantes de protección



Guante suave

Hecho de algodón, este guante ofrece una protección suave y flexible para la mano, garantizando al mismo tiempo la comodidad y la seguridad del paciente.

- *Ref: RCP01100*



Guante rígido "Malla"

Hecho de algodón, la superficie de este guante, en la palma, permanece rígida. El exterior está cubierto con una malla, lo que permite que la piel respire. El paciente no puede agarrar ningún objeto ni abrir correas. No pueden retirar tubos o vendajes. Este guante es especialmente adecuado para pacientes inquietos o que tienden a dañarse a sí mismos.

- *Ref: RCP01235*



Guante rígido

Hecho de algodón, la superficie de este guante, en la palma, permanece rígida. El exterior está cubierto con un suave tejido de algodón ventilado. El paciente no puede agarrar ningún objeto ni abrir correas. No pueden retirar tubos o vendajes. Este guante es especialmente adecuado para pacientes inquietos o que tienden a dañarse a sí mismos.

- *Ref: RCP012358*

Indicaciones para el uso de productos de inmovilización

Descubra cómo RENOL revoluciona la fijación tradicional al adoptar estrategias innovadoras después de una evaluación exhaustiva de riesgos.

- 1

Dispositivo médico

Los productos RENOL son dispositivos médicos diseñados para garantizar la seguridad del paciente en diferentes situaciones, especialmente cuando se inmoviliza en la cama, en una camilla o en una silla de ruedas. Estos productos se utilizan principalmente en el sector de la salud, como hospitales, clínicas, residencias de ancianos y otras instalaciones médicas.
- 2

Prescripción obligatoria

Los productos de inmovilización RENOL solo se utilizan con receta médica.
- 3

Personal capacitado

Uso de productos RENOL por personal capacitado de acuerdo con las instrucciones de seguridad de RENOL y de conformidad con las normas de seguridad de la instalación.
- 4

Lea las instrucciones

Es esencial leer y comprender cuidadosamente las instrucciones de uso antes de utilizar los productos (correas, bandas, cerraduras). También se recomienda encarecidamente ver los videos sobre el posicionamiento de los productos RENOL.
- 5

Control del producto

Compruebe los productos antes de cada uso, el producto debe estar limpio y en buen estado.
- 6

Monitoreo del paciente

Controle regularmente al paciente inmovilizado, los pacientes agitados e incontrolables deben ser monitoreados constantemente.
- 7

Reevaluación de riesgos

Evalúe regularmente de manera objetiva los riesgos de caídas y lesiones graves.

Renol

Correa con hebilla para silla



Correa abdominal

La correa abdominal evita que el paciente se levante de la silla. Combine la correa con el cojín inclinado con abducción para evitar que el paciente se deslice.

- *Ref: RFC26100*

-Talla única



Cinturón abdominal y pélvico

El cinturón abdominal y pélvico evita que el paciente se levante, se deslice hacia adelante y se caiga de la silla.

- *Ref: RFC26200*

-Talla única



Cinturón abdominal y de hombro

El cinturón abdominal y de hombro evita que el paciente se levante y se incline hacia adelante. Combine la correa con el cojín inclinado con abducción para evitar que el paciente se deslice.

- *Ref: RFC26300*

7 -Talla única

CAT-EN-VS-240924



Cinturón abdominal, pélvico y de hombro

El cinturón abdominal, pélvico y de hombro evita que el paciente se levante, se incline, se deslice hacia adelante y se caiga de la silla.

- *Ref: RFC26400*

-Talla única



Sistema de correas con cierre de bloqueo para silla



Cinturón abdominal y pélvico

Para pacientes con alto riesgo de caídas. El cinturón evita que el paciente se levante, se deslice hacia adelante y se caiga de la silla. Este cinturón se puede equipar con un sistema de bloqueo magnético (M) o mecánico (RL).

- Ref: RFC29200 (M)
- Talla única
- Cierre: 2 cierres (M)
- +1 llave (M)



Cinturón abdominal, pélvico y de hombro

Para pacientes con alto riesgo de caídas. El cinturón abdominal, pélvico y de hombro ofrece una seguridad óptima, evita que el paciente se levante, se caiga hacia adelante, se deslice hacia adelante y se caiga de la silla. Este cinturón se puede equipar con un sistema de bloqueo magnético (M) o mecánico (RL).

- Ref: RFC29400 (M)
- Talla única
- Cierre: 2 cierres (M)
- +1 llave (M)



Cinturón abdominal

Para pacientes con alto riesgo de caídas, el cinturón abdominal, que se coloca alrededor de la cintura, evita que el paciente se levante. Este cinturón se puede equipar con un sistema de bloqueo magnético (M) o mecánico (RL).

Combine el cinturón con el cojín inclinado con abducción o agregue el cinturón pélvico RFP22000 para evitar que el paciente se deslice hacia adelante.

- Ref: RFC47115 (M)+ opción RFP22000 (pélvico)
- Talla: Pequeña/Mediana, 60 a 110 cm
- Cierre: 2 cierres (M)
- +1 llave (M)
- Ref: RFC47140 (M)+ opción RFP22000 (pélvico)
- Talla: Grande, 85 a 135 cm
- Cierre: 2 cierres (M)
- +1 llave (M)



Cinturón abdominal y pélvico

Para pacientes con alto riesgo de caídas, el cinturón abdominal con cinturón pélvico integrado, que se coloca alrededor de la cintura, evita que el paciente se levante y se deslice hacia adelante. Este cinturón se puede equipar con un sistema de bloqueo magnético (M) o mecánico (RL).

- Ref: RFC57115 (M)
- Talla: Pequeña/Mediana, 60 a 110 cm
- Cierre: 2 cierres (M)
- +1 llave (M)
- Ref: RFC57140(M)
- Talla: Grande, 85 a 135 cm
- Cierre: 2 cierres (M)
- +1 llave (M)

Sistema de cierre de correa abdominal con cierre de bloqueo para cama



Sistema de correa abdominal + cinturón pélvico

Los cinturones abdominales "ROLL BELT" con correas de refuerzo y cinturón pélvico integrado están diseñados para asegurar al paciente a la cama.

Estos cinturones están disponibles en diferentes modelos y tamaños, con una elección entre dos anchos: 14 cm o 18 cm, para adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. Esta correa está equipada con un cierre de imán (M) o un cierre mecánico (RL).

- Ref: RFB09115P (M)

-Tamaño: Pequeño/Mediano, 60 a 110 cm /ancho 14 cm

-Cierres: 3 cierres(M) +1 llave(M)

- Ref: RFB09140P (M)

-Tamaño: Grande, 85 a 135 cm /ancho 14 cm

9 -Cierres: 3 cierres(M) +1 llave(M)



Correa para el hombro

La correa para el hombro está diseñada para evitar que el paciente se deslice hacia arriba o levante el tronco. Esta correa está equipada con un cierre de imán (M) o un cierre mecánico (RL).

- Ref: RFY21610 (M)

-Talla única

-Cierres: 5 cierres(M) +1 llave(M)




Muñequera para correa abdominal

La muñequera, combinada con el "ROLL BELT", permite sujetar de forma segura las muñecas del paciente. Ofrece dos niveles de seguridad: un cierre de velcro y un sistema de bloqueo. Esta correa está equipada con un cierre de imán (M) o un cierre mecánico (RL).

- Ref: RFW16100 (M)

-Tamaño: Mediano, 14 a 22 cm

-Cierres: 2 cierres(M)

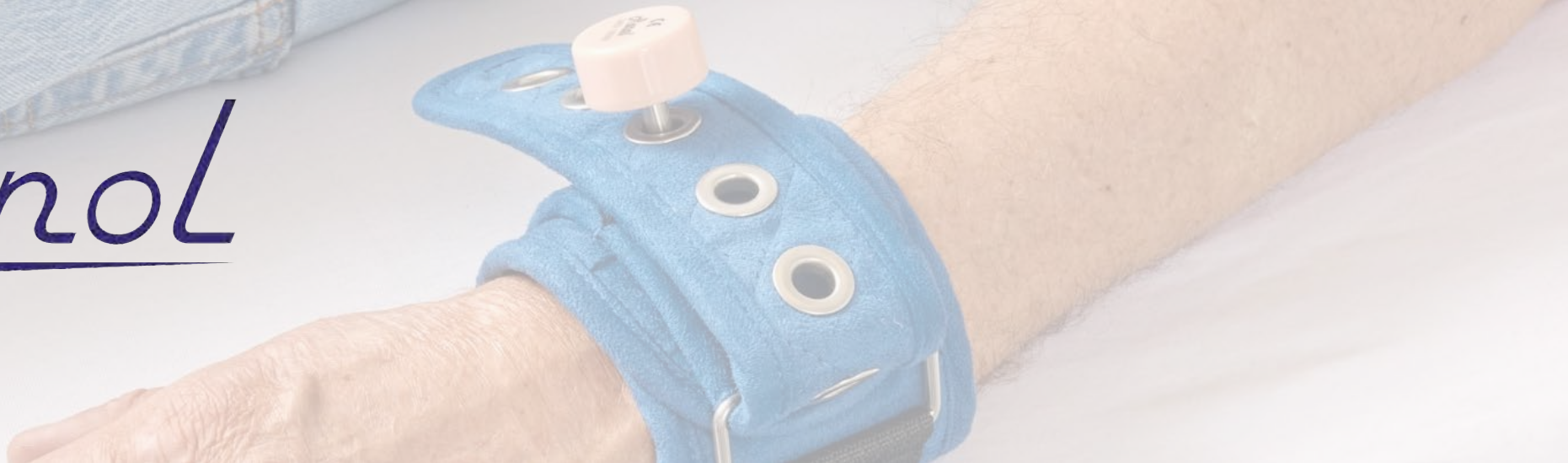

Muñequeras y tobilleras con cierre de bloqueo



Muñequeras

Las bandas mantienen las muñecas del paciente en su lugar. Ofrecen dos niveles de seguridad: un cierre de velcro y un sistema de bloqueo. Las bandas se pueden equipar con un cierre magnético (M) o un cierre mecánico (RL).

- Ref: RFW16210 (M)

-Talla: Pequeña 10 a 18 cm

-Cierres: 4 cierres (M) + 1 llave (M)

- Ref: RFW16200 (M)

-Talla: Mediana 14 a 22 cm

-Cierres: 4 cierres (M) + 1 llave (M)

- Ref: RFW16220 (M)

-Talla: Grande 18 a 26 cm

-Cierres: 4 cierres (M) + 1 llave (M)

Tobilleras

Las bandas mantienen los tobillos del paciente en su lugar. Ofrecen dos niveles de seguridad: un cierre de velcro y un sistema de bloqueo. Las bandas se pueden equipar con un cierre magnético (M) o un cierre mecánico (RL).

- Ref: RFA17210 (M)

-Talla: Pequeña 16 a 24 cm

-Cierres: 4 cierres (M) + 1 llave (M)

- Ref: RFA17200 (M)

-Talla: Mediana 18 a 28 cm

-Cierres: 4 cierres (M) + 1 llave (M)

- Ref: RFA17220 (M)

-Talla: Grande 23 a 32 cm

-Cierres: 4 cierres (M) + 1 llave (M)

Muñequeras y tobilleras

Las bandas tienen la ventaja de que se pueden utilizar tanto para las muñecas como para los tobillos. Ofrecen dos niveles de seguridad: un cierre de velcro y un sistema de bloqueo. Las bandas se pueden equipar con un cierre magnético (M) o un cierre mecánico (RL).

- Ref: RFL15000 (M)

-Talla: 14 a 28 cm

-Cierres: 4 cierres (M) + 1 llave (M)



Muñequeras y tobilleras



Muñequeras Eco

Las muñequeras "Eco" mantienen las muñecas del paciente en su lugar. Tiene un cierre de velcro.

- Ref.: RFL15900

-Talla única



Muñequeras Eco Comfort

Las muñequeras "Eco Comfort" mantienen las muñecas del paciente en su lugar. Tiene un cierre de velcro y hebilla.

- Ref.: RFL15700

-Talla única



Muñequeras y tobilleras Premium

Las muñequeras y tobilleras "Premium" se pueden utilizar tanto para las muñecas como para los tobillos. Ofrecen dos niveles de seguridad gracias a un sistema de velcro y una doble hebilla de acero inoxidable, lo que proporciona una protección óptima.

- Ref.: RFL15087

-Talla única

Renol



Sistemas de bloqueo

RENOL ofrece sistemas de bloqueo magnéticos y mecánicos para asegurar dispositivos de restricción. El sistema magnético (M) contiene una llave (RFK01111) y un pasador con un botón de bloqueo (RFK01222). El sistema mecánico (RL), hecho de acero inoxidable, consta de una llave (RFK00100) y un pasador con un botón de bloqueo (RFK00433). Todos nuestros cinturones están disponibles con o sin cerraduras. Simplemente agregue la letra (M) para el bloqueo magnético o (RL) para el bloqueo mecánico a las referencias del cinturón.



Bloqueo magnético (M)

Botón y pasador

- *Ref: RFK01222*



Botón magnético (M)

Botón

- *Ref: RFK01202*



Pasador magnético (M)

Pasador de acero inoxidable

- *Ref: RFK01201*



Llave magnética (M)

Llave

- *Ref: RFK01111*



Bloqueo mecánico (RL)

Botón y pasador de acero inoxidable

- *Ref: RFK00433*



Botón mecánico (RL)

Botón de acero inoxidable

- *Ref: RFK00400*



Pasador mecánico (RL)

Pasador de acero inoxidable

- *Ref: RFK00300*



Llave mecánica (RL)

Llave

- *Ref: RFK00100*

Paquete de seguridad rápido



Paquete de seguridad

La "BOLSA DE CRISIS" RENOL está diseñada específicamente para manejar situaciones con pacientes agitados. Ofrece al personal de atención una solución completa y siempre disponible para asegurar rápida y eficazmente a un paciente en caso de emergencia.

Ref: RFBAG115M - "BOLSA DE CRISIS"

Contiene las Ref:

- *RFB09115 (cinturón abdominal)*
- *RFP22000 (cinturón pélvico)*
- *RFB10200 (extensión del cinturón abdominal)*
- *RFY21610 (correa de hombro)*
- *RFW16200 (muñequera)*
- *RFA17200 (tobillera)*
- *RFK01222 (18 x cierre magnético)*
- *RFK01111 (4 x llave magnética)*

Intervención rápida

Contiene todo lo necesario para una intervención rápida: un cinturón abdominal con correas de refuerzo, un cinturón pélvico, una correa de hombro, muñequeras y tobilleras, así como los cierres magnéticos necesarios.

Todo a mano

Esta bolsa permite al personal de atención tener todo a su alcance.

Puede armar su propia bolsa de crisis según las necesidades de su centro.

Ventajas de RENOL

Comodidad y seguridad para el paciente

Los medios de inmovilización RENOL están diseñados para brindar la máxima comodidad y seguridad a los pacientes.

Fabricados con tela de terileno, un material suave contra la piel, proporcionan una comodidad superior y evitan la irritación por fricción. El terileno permanece flexible y se puede lavar a hasta 95°C, lo que garantiza durabilidad e higiene impecable.

Compromiso de calidad

Todos los productos RENOL se fabrican con materiales de alta calidad y se someten a estrictos controles para garantizar su seguridad y fiabilidad.

Nuestras correas tienen una construcción multicapa, lo que les confiere una resistencia a la tracción equivalente a 339 kg. El grosor del acero inoxidable de nuestros anillos garantiza una resistencia que puede soportar cualquier situación de crisis.

Soluciones innovadoras

RENOL ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras, diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los pacientes y los proveedores de atención médica, combinando seguridad, comodidad y eficiencia.

Ventajas de los medios de fijación RENOL

Facilidad de uso

Suavidad de las correas

Calidad y resistencia

Higiene y lavado a 95°

Durabilidad de los productos

Póngase en contacto con RENOL para soluciones innovadoras de seguridad del paciente

Renol

1

Descubra los productos

Descubra la gama de soluciones para la seguridad y el confort del paciente.

2

Consulte a los expertos

Hable con nuestro distribuidor sobre sus necesidades específicas en materia de atención al paciente.

3

Implementar soluciones

Integre los dispositivos RENOL en su centro de atención para mejorar la atención al paciente.

4

Póngase en contacto con nosotros:

5

RENOL S.A.

Rue Johannes Kepler 3, unidad 3

1357 Hélécine - Bélgica

Tel.: +32 (0)19 332367

Correo electrónico: office@renolcare.com

www.renolcare.com

